

## Kit Hygiène

Référence : HYIPK05



### Comprenant :

- 2 boites de 20 comprimés Protanet
- 1 gobelet pour comprimés Protanet
- 1 paire de séchage
- 1 outil une fonction

### Notice :

#### PROTANET

Nettoyage de l'embout auriculaire

Comprimés de nettoyage pour des embouts auriculaires. 30 minutes suffisent pour une élimination efficace du cérumen. Les embouts auriculaires et les événements (aérations) obstrués par le cérumen diminuent la qualité sonore.


**Pour remédier à cela :** Retirer le tamis du gobelet. Remplir le gobelet d'eau tiède et ajouter le comprimé de nettoyage effervescent PROTANET.

Détacher l'embout auriculaire de l'aide auditive. Ne jamais plonger dans l'eau une aide auditive. Poser l'embout dans le tamis et remettre ce dernier dans le gobelet pendant 30 minutes. Puis, retirer le tamis avec l'embout et le rincer sous l'eau tiède.

Essuyer l'embout et sécher les aérations avec la poire, de manière à éliminer complètement l'humidité. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage complet des embouts auriculaires 1 à 2 fois par semaine.

#### Précaution d'emploi :

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions oculaires. Usage externe. Usage unique. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Nocif pour les organismes aquatiques. Éviter le rejet dans l'environnement. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. En cas d'ingestion : appeler un centre anti-poison / un médecin. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

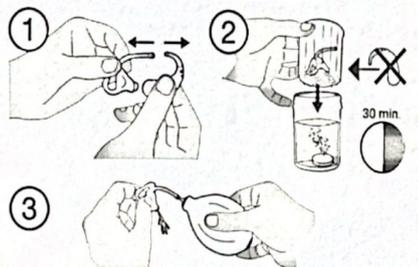

EAROW BY PRODWAYS - NÎMES  
1 Route d'Aubais - CS 30255  
30111 CONGENIES  
Tél. : 33 (0) 466.80.22.89

EAROW BY PRODWAYS - LYON  
2, impasse Maurice Ravel  
69330 JONAGE  
Tél. : 33 (0) 472.37.12.70

EAROW BY PRODWAYS - ROUEN  
67, Rue Charles Lindbergh 76520  
BOOS  
Tél. : 33 (0)2 35 60 57 24